

## Diyaliz Kateter Kiti

### Uygulama Kapsamı

Diyaliz kateter kiti, kalıcı erişim sağlanana veya başka bir diyaliz tedavisi türüyle değiştirilene kadar diyaliz için geçici vasküler erişim sağlar.

**Kontrendikasyonları** : Bilinen yok

### Güvenlik ve etki değerlendirmeleri:

Bu ürün tek kullanımlıktır. Tekrar sterilize etmeyin ya da tekrar kullanmayın. Yerleştirme, kullanma veya çıkarma sırasında kateteri, rehber teli veya başka bir bileşeni değiştirmeyin.

### Kateter Yerleştirme Talimatları:

- 1.Steril tekniği kullanın.
- 2.Hazırlık ve örtülü delme yeri gereklidir.
- 3.Uygulama iğnesiyle damarı delin ve ekli şırıngaya aspire edin.
- 4.Başarılı bir şekilde deldikten sonra rehber tel dispenseri kullanarak rehber tel uygulama iğnesiyle rehber teli damara yerleştirin. İstenen derinliğe kadar iletin. J ucunun ilerlemesi hafif bir döndürme gerektirebilir.

**Uyarı:** Rehber teli uzunluğunu değiştirecek şekilde kesmeyin. Muhtemel kesmeyi veya rehber tele zarar vermeyi önlemek için rehber teli iğneyi eğerek çekmeyin.





- 5.Rehber teli yerinde tutun ve uygulama iğnesi çıkarın.
- 6.Rehber telden uzağa yerleştirilen bisturinin kesme kenarıyla perkütanoz delme yerini genişletin(opsiyonel) Önlem: Yeri gerektirdiği şekilde genişletmek için damar dilatörünü kullanın. Uyarı: Muhtemele damar duvarı perforasyonu önlemek için kateter yerleştirilirken damar dilatörünü yerinde bırakmayın. Dilatör sadece delme yerini genişletmek için kullanılır.
- 7.Kateter ucunu rehber telin arasında geçirin. Hafif kıvrıma hareketleriyle kateteri damara sokun. Yerleştirme referans noktaları olarak kateter üzerinde cm işaretleri kullanın, kateteri nihai yerleştirme yerine ilerletin. Kateteri sağlamlaştırın ve geçici olarak sarın.
- 8.Kateteri yerinde tutun, rehber teli çıkarın.











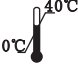


9.Gerekirse yerleştirme yerini büzmek-bağlamak için dikiş kullanın.

10.Diyaliz kateter kiti, kalıcı erişim sağlanana veya başka kan patojenlerine maruz kalma riskinden dolayı sağlık çalışanları, bütün hastaların bakımında "evrensel kan ve kan sıvısı önlemlerini" rutin olarak almalıdır.

**Dikkat:** HIV'e(İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) veya başka kan patojenlerine maruz kalma riskinden dolayı sağlık çalışanları, bütü hastaların bakımında "evrensel kan ve kan sıvısı önlemlerini" rutin olarak almalıdır.

## TANIMLAR

	DİKKAT		Kuru yerde saklayın
	Yığın kodu		Pirojenik (ateş yükseltici) değil

	Yeniden sterilize etmeyin		Paket hasarlıysa kullanmayın
	Gündüz kullanın		Yeniden kullanmayın
	Etilen oksit ile sterilize edilmiştir		Üretim tarihi
	Katalog no		Kullanım talimatlarına bakın
	İmalatçı		Güneş ışığından uzak tutun
	Sıcaklık sınırı		Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi
	CE işareti	<b>0197</b>	Onaylanmış Kuruluş Kimlik numarası



SHUNMEİ MEDICAL Co., Ltd .

Merkez Ofis: R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong

Road Baolong Industrial Zone, Longgang

District 518116 Shenzen, Guangdong, Çin

Fabrika: Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone , Pingtan

Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, Çin

TEL: 0086-0752-3306949

Email: nora@shunmed.com



Lotus NL B.V

Add: Koningin JULIANAPLEİN 10,1e, Verd, 2595AA, The Hague, Hollanda

Tel: +31644168999

Email: peter@lotusnl.com

İTHALATÇI ADRESİ: Halil Rifat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. B Blok Perpa İş Apt. No:1B/1689

Şişli/ İSTANBUL

TEL: 0530 760 43 81

OFİS TEL: 0212 320 00 50

Email: nora4@shunmed.com